



MelFoam Kombi



Das leistungsstarke Duo mit der Effizienz des Honigs.

MelFoam Kombi ist die Kombination aus unserer Primärauflage MelMax® und der Sekundärauflage flexifoam.



MelMax® wird u. a. genutzt bei mäßig bis stark exsudierenden und verunreinigten Wunden.

flexifoam wirkt aufsaugend, schützt vor Verunreinigungen und ist zugleich atmungsaktiv und wasserabweisend.

Principelle **Deutschland**

Vorteile und Anwendungshinweise von MelFoam Kombi

- MelFoam ist die Kombination aus unser **Primärauflage MelMax®** und der **Sekundärauflage flexifoam**
- **MelMax®** ist ein steriler Wundverband, der mit Buchweizenhonig imprägniert wurde
- als Primärauflage benötigt **MelMax®** immer den direkten Kontakt zum Wundgrund, um seine volle Wirkung zu entfalten
- üblicherweise wird **MelMax®** alle ein bis drei Tage gewechselt und lässt sich leicht applizieren und entfernen
- **flexifoam** zeichnet sich durch einen schützenden PU Film aus, der vor Verunreinigungen von außen schützt und atmungsaktiv und wasserabweisend ist
- die superabsorbierende Gelschicht von **flexifoam** schließt Exsudat sicher ein - auch unter Kompression - und schützt vor Mazeration
- der weiche PU Schaum von **flexifoam** passt sich dem Wundgrund flexibel an, schützt das neu entstehende Gewebe und bietet so einen sehr hohen Tragekomfort

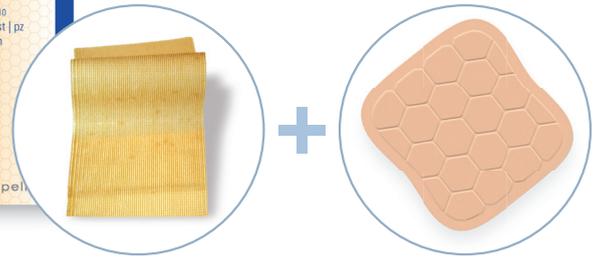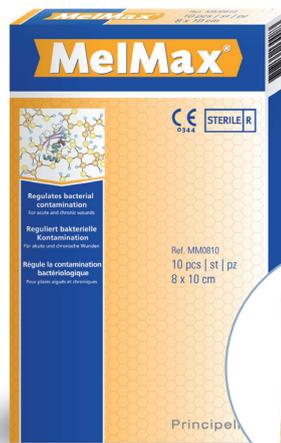

sanaFactor

Principelle MelFoam Kombi distributed by:

Principelle Deutschland UG
Klinkerstraße 51
D-25436 Moorrege

T +49(0)4122 927 818-0
F +49(0)4122 927 818-18
schmidt@principelle.de
www.principelle-deutschland.de

Größe	Menge	Bestellnummer	PZN
S (5x6/8x7 cm)	für 10 Verbandwechsel	MF070810	12730005
M (8x10/11x11 cm)	für 10 Verbandwechsel	MF111110	12730011
L (8x20/22x15 cm)	für 10 Verbandwechsel	MF221510	12730028



Principelle B.V.
info@principelle.com
www.principelle.com

Principelle Deutschland