


# Behandlung einer entzündeten Wunde durch einen Unfall mit **Principelle IF Wundgel**, **Principelle Matrix** und **MelMax**.

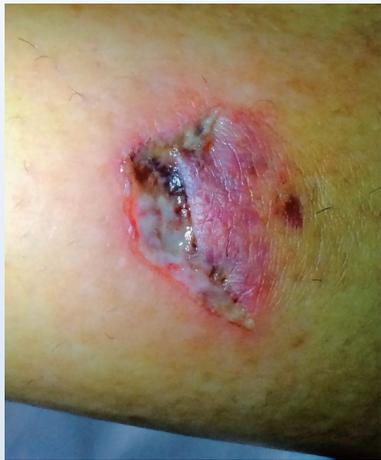

Frau (Alter 50) präsentiert ausgehölte Entzündung nach Unfall.

Erste Phase: Infektion und Entzündung abbauen.



## Verwendete Produkte:

Principelle IF (PPIF15), auf Honig basierendes antibakterielles Wundgel



Principelle IF-Honiggel wird für die starke Infektion benutzt. MelMax und Principelle Matrix Verbände wurden als Schutz benutzt (Wunde überzogen).

Verbandswechsel: alle 4 - 5 Tage


MelMax (MM081010), steril in Honig getränkter Wundverband



Zweite Phase der Behandlung: Granulation unterstützen, nur Principelle Matrix wurde benutzt.

Verbandswechsel: alle 7 Tage.

Principelle Matrix (PPM1010), steril imprägnierter Wundverband

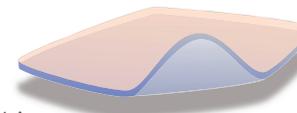

Die Wunde ist komplett verheilt, ohne Funktionsverlust oder Nebeneffekten. Haut ist flexibel.